


本書をお読みになる前に、別冊の「取扱説明書」の「安全上のご注意」と「使用上のご注意」をお読みください。

ボイスレシーバーを使う

- 1 電源が「切」になっていることを確認し、電池を入れる
付属の単4形充電式ニッケル水素電池を1本使います。

付属の電池は出荷時に充電されていますので、すぐにご使用いただけます。

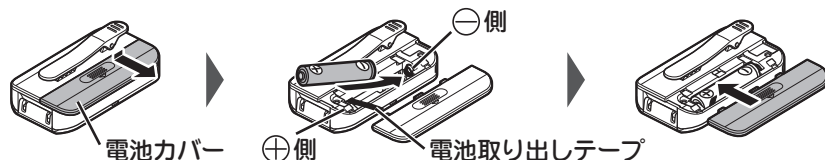

- 電池の向きを、本体内部の表示に合わせて正しく入れてください。


- 2 音量を「0」にし、イヤホンコードを本体につなぐ



音量を大きくしたままイヤホンを耳に入れると、ピー音(ハウリング)が発生する場合がありますのでご注意ください。


- 3 左右表示を確認の上、イヤホンをそれぞれの耳に入れる

- イヤホンは耳にしっかり入れてください。
- 左側には半円形の凸形状があります(図参照)。
- イヤーピースのサイズが合わない、または聞き取りにくいときは、イヤピースのサイズを変更してください。(→取扱説明書18ページ)

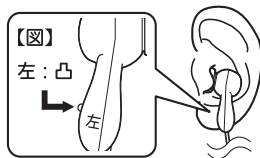

- 4 電源を「入」にする

電源ランプが緑色に点灯します。

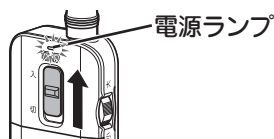

- 5 音量を調節する

- 「ピー」という音(ハウリング)がしたら音量を下げてください。
- 片方の音だけ聞き取りにくいときは、左右の音量バランスを調節してください。(→取扱説明書20ページ)



詳しい使いかたについては、別冊の取扱説明書をお読みください。